


ATOMVET s.r.o.

www.atomvet.cz
info@atomvet.cz

Ostašovská 521, 46001 Liberec 11 CZECH REPUBLIC
tel./fax: +420 485 113 655 tel: +420602462432
IČO: 25022164 DIČ: CZ25022164


Foukačka Atomvet - Návod k plnění střel -

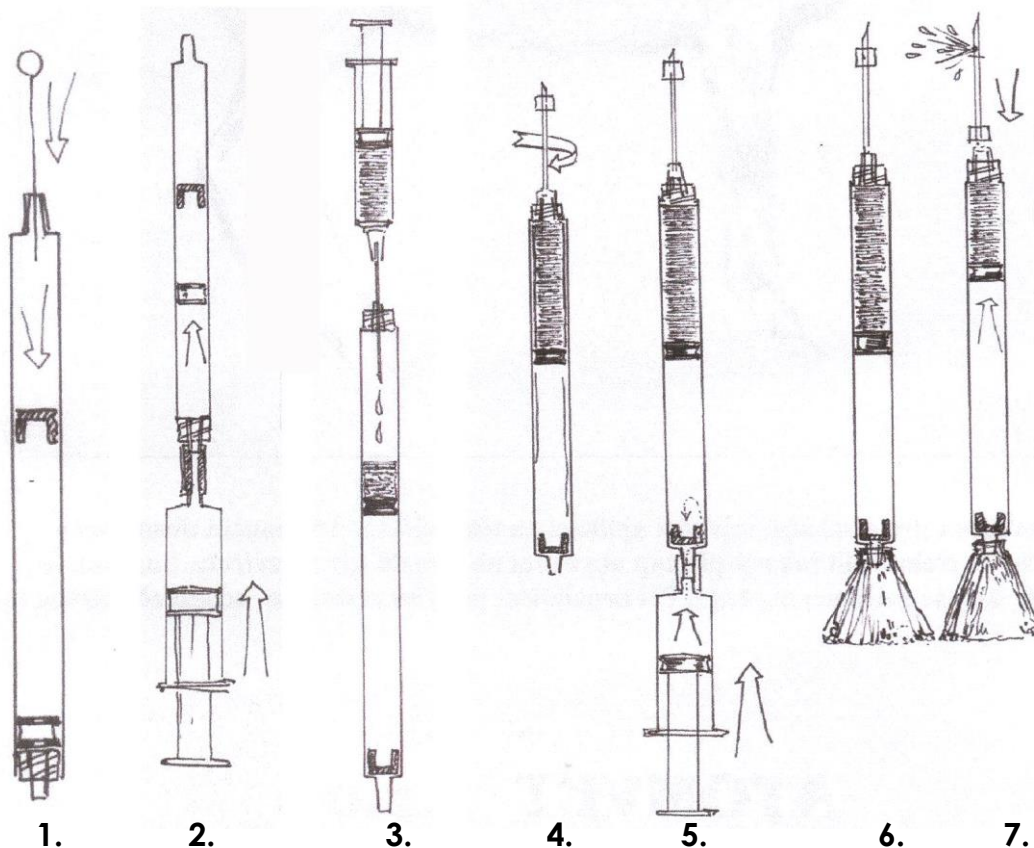

1. Uvolněte přetlak speciálním trnem zatlačením na volný píst. (Při prvním použití přetlak v komoře není.)
2. Pomocí tlakovače a přechodky posuňte těsný plochý píst do středu střely.
3. Naplňte komoru s těsným pístem injekční látkou.
4. Naplněnou komoru uzavřete jehlou s těsněním.
5. Ve svislé poloze natlakujte střelu pomocí tlakovače s přechodkou. Vzduch se dostane okolo volného pístu do komory, ve které se tak vytvoří přetlak.
6. Na konec střely nasadte stabilizátor.
7. Nyní je střela připravena k použití. Na obrázku je znázorněno uvolnění injekční látky ze střely po zabodnutí do svalů zvířete: silikonové těsnění se posune, tím vytvoří otvor pro uvolnění přetlaku ve střele a aplikaci injekční látky.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE PRŮCHODNOST STŘELY A FUNKCI TĚSNĚNÍ!

Kompletní střela:

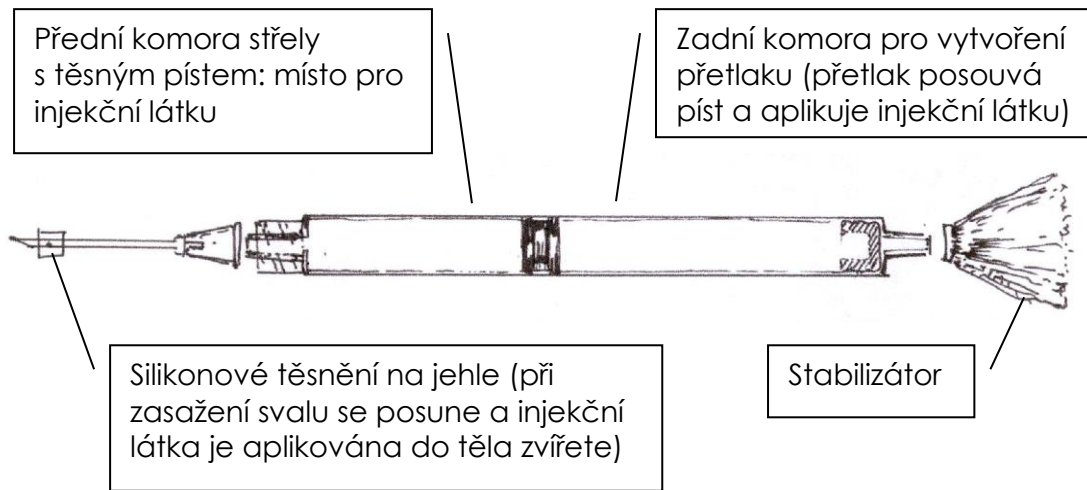

Místa pro aplikaci na těle zvířete:

